

Zahnreinigungstinktur HCl 6,39 Vol.-%

d

Dental Cleansing solution HCl 6,39 Vol.-%

eng

Blanqueador dental HCl 6,39 Vol.-%

es



• Entfernt leicht Zahnbelag

• Easy removal of dental plaque

• Elimina leve sarro sobre los dientes

FAVODENT Zahnreinigungstinktur dient zur Initialbehandlung bei der systematischen Parodontaltherapie. Durch die Entfernung von Zahnbelägen wird bakteriellen Entzündungen des Zahnfleisches und somit Parodontose vorgebeugt. Verfärbungen z.B. durch Nikotin und Coffein im natürlichen Gebiß und bei Füllungen werden entfernt.

FAVODENT dental cleansing solution is for initial treatment within the context of systematic periodontal therapy. It removes dental plaque, preventing bacterial inflammation of the gum and periodontosis. It also removes discoloration, e. g. caused by nicotine and caffeine, from both natural teeth and fillings.

El blanqueador dental FAVODENT sirve para el tratamiento inicial en la terapia periodontal. Mediante la eliminación de los depósitos sobre los dientes se previenen inflamaciones bacterianas y con ello la enfermedad periodontal. Elimina pigmentaciones originadas p. ej. por nicotina y cafeína en la dentadura natural y en obturaciones.

30 ml Flasche Bestell-Nr. 620
100 ml Flasche Bestell-Nr. 621

30 ml bottle Order No. 620
100 ml bottle Order No. 621

botella de 30 ml N° de artículo 620
botella de 100 ml N° de artículo 621

Zahnreinigungs- tinktur HCl 6,39 Vol.-%

deutsch

Zusammensetzung:

HCl 6,39 Vol.-%,
Zitronenöl (zur Geschmacksverbesserung)

Anwendung:

Wattestäbchen oder Pellets werden in die Lösung getaucht und die zu behandelnden Zähne gesäubert, bis kein Belag mehr vorhanden ist.

Dabei ist eine rotierende Bewegung günstig.

Wichtig ist das sofortige Nachspülen mit Wasser.

Empfehlenswert ist die Nachbehandlung mit FAVODENT Zahnvaseline.

Die Behandlung darf ausschließlich in der zahnärztlichen Praxis erfolgen.

Kontraindikationen:

keine



Dental Cleaning solution HCl 6,39 Vol.-%

english

Composition:

HCl 6,39 Vol.-%,
lemon oil (as flavouring agent)

Instructions for use:

Dip cotton wool sticks or pellets in solution and clean appropriate teeth until all plaque is removed.
For best results, use a rotary motion.

Be sure to rinse immediately with water.

A subsequent application of FAVODENT dental vaseline is recommended.

For use in dental practices only.

Contraindications:

none



Blanqueador dental HCl 6,39 Vol.-%

español

Composición:

HCl 6,39 Vol.-%,
aceite de limón (para un mejor sabor)

Uso:

Sumergir el bastoncillo o la torunda de algodón en la solución y limpiar los dientes a tratar, hasta que ya no queden depósitos sobre los dientes.

Se aconseja aplicar la solución con un movimiento circular.

Es muy importante enjuagarse la boca con agua después del tratamiento.

Se recomienda un tratamiento posterior con vaselina dental FAVODENT.

El tratamiento sólo se ha de utilizar en un consultorio odontológico.

Contraindicaciones:

ningunas



FAVODENT Karl Huber GmbH, Greschbachstr. 17, 76229 Karlsruhe
Telefon: +49(0)721-62 686-0, Telefax: +49(0)721-62 686-66
E-Mail: info@favodent.com, Internet: www.favodent.com

Vertrieb über/distribution: