

Favosept® Konzentrat



Anwendungsbereiche:

Favosept® Konzentrat ist ein hochwertiges alkoholfreies Instrumentendesinfektionsmittel auf der Basis von quaternären Verbindungen mit hervorragender Reinigungskraft, insbesondere im Ultraschallbad. Das leistungsstarke Produkt wird eingesetzt bei chirurgischen und zahnärztlichen Instrumenten aller Art. Favosept® Konzentrat verfügt über kurze Einwirkzeiten - selbst bei hoher Belastung - und bietet eine umfassende Wirkung.

Gutachten:

Prof. Dr. H. Schubert, Frankfurt a.M., DGHM-Verfahren, 12.2000

Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, DGHM-Verfahren, 07.2000

Prof. Dr. Gert Frösner, München, viruzide Wirksamkeit, 07.2000

Desinfektionsmittel für ärztliche Instrumente

- Alkohol- und aldehydfrei
- Material schonend
- Sehr gute Reinigungseigenschaften
- Ideal für Ultraschallbad
- Nicht korrosiv

Umfangreiches Wirkungsspektrum:

- Bakterizid
- Tuberkulozid
- Mycobakterizid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV)

Wirkstoffkombination:

In 100 g Favosept® Konzentrat sind enthalten:

9,9 % Bis (3-aminopropyl)dodecylamin

8,4 % Didecylmethylpolyoxyethylammoniumpropionat, nichtionische Tenside

Einwirkzeiten:

Bakterien (inkl. TbB u. Mycobacterium terrae) und Pilze (Candida albicans)

- hohe Belastung	3,0 %	15 min
	2,0 %	30 min
	1,0 %	60 min

HBV-/HIV-Inaktivierung	3,0 %	15 min
- hohe Belastung	1,0 %	60 min

Verpackungseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 L Dosierflasche	1915227	161
5 L Kanister	1915233	162

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

0721-62686-0

info@favodent.com