

Floracin® NF Konzentrat



Anwendungsbereiche:

Floracin® NF ist ein alkoholfreies Konzentrat zur kombinierten Desinfektion und Reinigung von abwaschbaren großen Flächen (Wände und Böden), Gegenständen und Medizinprodukten in Kliniken, Arztpraxen und Laboren. Es ist ebenfalls geeignet zur Desinfektion von Prothesen und Silikonabdrücken.

Bedingt durch seine sehr gute Fettlösefähigkeit kann Floracin® NF Konzentrat auch im Lebensmittelbereich angewendet werden. Das Material schonende Produkt auf Basis von quaternären Verbindungen verfügt über schnelle Einwirkzeiten - selbst bei hoher Belastung - und bietet ein breites Wirkungsspektrum.

Wischdesinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Oberflächen von Medizinprodukten

- Alkohol- und aldehydfrei
- Materialverträglich und schonend
- Sehr gute Reinigungseigenschaften
- Hohe Fettlösekraft
- Biologisch abbaubar

Umfangreiches Wirkungsspektrum:

- Bakterizid
- TbB (Mycobact. terrae und M. avium)
- Begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV/HIV/HCV)
- Levurozid

Wirkstoffkombination:

In 100 g Floracin® NF Konzentrat sind enthalten:
3,15g Didecylmethylpolyoxyethylaminopropionat,
3,5g Bis (3-aminopropyl)dodecylamin, Tenside

Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans nach DGHM/VAH
(hohe Belastung) 1,0 % - 5 Min
0,5 % - 15 Min

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV)
gemäß BGA(RKI)/DVV 1,0 % - 5 Min
0,5 % - 15 Min

TbB (Mycobact. terrae) 1,0 % - 30 Min
(ohne Belastung) 0,5 % - 60 Min

TbB (M. terrae und M. avium) 1,5 % - 60 Min

Verpackungseinheit	Art.-Nr.
1 L Dosierflasche	155
5 L Kanister	156

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

+49 (0) 721/62 6860
info@favodent.com

Flächendesinfektion

CE 0482

REF 1558-01 2016-06 DE